

PROTOCOLE AUTO-PRELEVEMENT SALIVAIRE COVID-19

CONDITIONS



Respecter un délai de 30 minutes entre la dernière prise d'aliment, de boisson, brossage des dents avant la réalisation du test.


Pas d'effort de toux ni raclement de gorge.



1. Se laver les mains



2. Ouvrir le sachet contenant le tube avec entonnoir

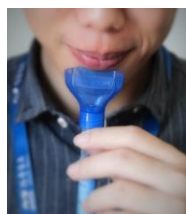

3. Saliver plusieurs fois bouche fermée pendant 30 secondes puis saliver dans le pot de recueil.
Renouveler l'opération si nécessaire jusqu'à obtention de minimum 1 ml sans bulles (1 cm tube vertical)



4. Dévisser l'entonnoir et le jeter dans les déchets ménagers

5. Fermer le tube hermétiquement avec le bouchon fourni, nettoyer l'extérieur du tube



6. Inscrire sur l'étiquette du flacon le Nom, Prénom, Date de Naissance

7. Noter la date et l'heure de prélèvement sur le formulaire de renseignement et de consentement.
Remettre cette fiche dans la poche du sachet

8. Glisser le tube dans le sachet de transport, le fermer hermétiquement.



9. Se laver les mains